

## Hämostatikum Al-Cu

20ml (0,7 fl oz) tekutina

**Obsažené látky:** chlorid hlinitý-hexahydrát, chlorid měďnatý-dihydrát, destilovaná voda

**Indikace:** K čistému a důkladnému odstranění zubního kamene, výrazně redukuje množství choroboplodných zárodků. K zastavení krvácení u malých poranění v dutině ústní. K zastavení krvácení kůže, sliznice a krvácení v kořenovém kanálku. K ošetření menších zánětlivých infekčních povrchových procesů v dutině ústní. Komponenty mědi účinně působí při léčbě gingivitidy a stomatitidy.

**Vlastnosti:** Sůl hliníku s malými anionty slouží jako koagulační prostředek tak, že je zaručena optimální difuze. Desinfekční působení zaručuje sloučenina mědi, působící mírněadstringeně a silně snižuje koncentraci choroboplodných zárodků i anaerobů.

**Použití:** Kapka Hämostatika Al-Cu se nanese prostřednictvím Hämostatikem nasáté peletky pod jemným tlakem na krvácející místo. Vrstva slin a hlenů snižuje účinek, proto je důležitý přímý kontakt s krvácejícím místem. V případě krvácení v kořenovém kanálku kápněte Hämostatikum na vatovou tyčinku nebo papírový čep a aplikujte pod jemným tlakem tlaku. Před nanášením na zánětlivá místa v dutině ústní opatrně odstraníme vrstvu hlenu.

**Pozor!** Tento lékařský produkt může být používán i u těhotných, kojících žen a dětí mladších 6 let, ale v těchto případech je třeba se poradit s ošetřujícím lékařem.

**Kontraindikace:** žádné

**Zabraňte kontaktu s očima!**

**Před použitím:** čtěte příbalový leták.

**Použitelnost do:** uvedeno na obale.

Nepoužívejte přípravek po expirační době. Je třeba zajistit odpovídající likvidaci odpadu. Mohou být přinesena jen zcela vyprázdněná balení.

Pokud máte otázky nebo problémy při použití tohoto lékařského produktu obraťte se, prosím, přímo na Humanchemie GmbH, rádi Vám poradíme.

**HUMANCHEMIE GmbH D-31061 Alfeld Tel. +49 (0) 5181 – 2 46 33**

**Fax + 49 (0) 51 81 – 8 12 26**

**[www.humanchemie.de](http://www.humanchemie.de)**