

Návod k použití

Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur**Směs k utěsnění spár v kavitě**

20 ml kapalina

Obsažené látky: : Měděný prášek mikron, dichlormetan, aceton, glycerol, polyvinylpyrrolidon, 2-propanol

Indikace: K prevenci sekundárního zubního kazu a recidiv zubního kazu díky hermetickému utěsnění mikroskopických spár mezi stěnou kavity a výplňovým tělesem (obzvláště u stříbro-zinkového amalgámu) voluminózními, baktericidními a aktivitu enzymů potlačujícími zásaditými sloučeninami mědi. Tohoto hermetického utěsnění, které současně vede k pevnému ukotvení výplně, se dosáhne aplikací nánosu jemného lamelárního prášku z aktivní mědi do kavity, který se přemění ve voluminózní sloučeniny mědi.

Vlastnosti: Po nanesení Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur do kavity a po odpaření suspenzní kapaliny z kavity, se vzniklý tenký film z aktivní mědi přemění po aplikaci výplně v průběhu týdnů ve voluminózní obtížně rozpustné zásadité sloučeniny mědi, které každou mikropáru na okraji výplně tak těsně vyplní, že dojde k měřitelnému významnému posílení ukotvení výplně. Zásadité sloučeniny mědi, hlavně uhličitany a laktáty, působí, jak je známo z tradičních amalgámů mědi, baktericidně, brání vzniku zubního kazu. Extrémně nízké množství Cu nezpůsobuje ani ztelná zbarvení zubu ani nedochází ke korozi amalgámu. Bohužel nelze tato vysoce účinná opatření z kosmetických důvodů praktikovat v oblasti frontálních zubů. V oblasti molárů lze Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur použít nejen ve spojení s amalgámovou výplní, nýbrž také s jinými výplňovými materiály (polymery, cementy). Také u inlayů a pod korunkou (nanesení na pahýl) přináší metoda výhody. Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur poskytuje všem výplním a korunkám známé cenné vlastnosti amalgámu mědi a současně potlačuje jeho nevýhody.

Použití: Do suché odmaštěné kavity nebo na pahýl se peletkou, která se bezprostředně před použitím napustí velmi důkladně protřepanou směsí Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur, nanese tato látka. Následně se teplým vzduchem opatrně osuší, poté se nacpe výplňový materiál nebo se nacementuje korunka.

Pozor! Tento lékařský produkt **není** určen pro těhotné ženy, kojící matky a děti do 6 -i let.

Poznámka: Tento lékařský produkt **není určen** pro těhotné ženy, kojící matky a děti do 6 -i let.

Poznámka: Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur je hořlavý a může za určitých okolností rozpustit některé plasty. Eventuálně se tvořící bílá sraženina neovlivní účinnost výrobku. Pokud by se kapalina odpařila, protože lahvička byla otevřená, lze ji doplnit na původní množství Kavitäten-Waschliquidem.

Mohu použít Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur pod kompozitní výplně?

Ano, do suché odmaštěné kavity nebo na pahýl se peletkou, která se bezprostředně před použitím napustí velmi důkladně protřepanou směsí Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur, nanese tato látka. následně se teplým vzduchem opatrně osuší. Poté se nacpe výplňový materiál nebo se nacementuje korunka. Je důležité zajistit, aby se produkt **před** aplikací nové kompozitní výplně zcela odpařil nebo odstranil. Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur vede díky přeměně aktivní mědi v zásadité sloučeniny mědi ke vzniku tmavého okraje, který u kompozitních výplní může opticky rušit. Při aplikaci vedle kompozitních výplní je třeba zajistit, aby tyto nepřišly do styku s produktem, protože Kavitätenspalt-Dichtungsmixtur za určitých okolností rozpouští kompozitní výplně.

Kontraindikace a nežádoucí účinky: viz nahoře

Zabraňte kontaktu s očima!

Lahvičku pevně uzavřít a uchovávat v chladu (lednička)!

Doba použitelnosti: uvedená na obalu.

Nepoužívejte přípravek po expirační době. Je třeba zajistit odpovídající likvidaci odpadu. Před likvidací do duálního systému musí být balení zcela vyprázdněna.

Pokud máte otázky nebo problémy při použití tohoto lékařského produktu, obraťte se, prosím, přímo na Humanchemie GmbH. Rádi Vám poradíme.